

ethyway.



Инструкция по эксплуатации

- Электрохимический сенсор.
- Время подготовки к работе: 10 сек.
- Время выдоха на сенсор: 7-8 сек.
- Сила выдоха: 10 л/мин.
- Погрешность измерений: +/- 0.025 мг/л на каждые 0.20 мг/л.
- Пределы измерений: 0.00 - 0.24 мг/л.
- Уведомление: звуковой сигнал + красная подсветка дисплея + сообщение "HI" на дисплее при уровне алкоголя 0.25 мг/л (предел для Франции).
- Температурный режим использования: от 10°C до 40°C.
- Температурный режим хранения: 0°C до 50°C.
- Тестовое измерение для калибровки устройства.
- Калибровка: необходимо осуществлять калибровку каждые 12 месяцев / 500 тестов, в зависимости от того, что наступит раньше.
- Определение силы выдоха и прерывания выдоха.
- Время измерения: не более 60 секунд.
- Жидкокристаллический дисплей (отображение 3х символов).
- Энергопотребление: алкалиновые батареи 1.5В, тип AAA (2 шт.).
- Ресурс работы от элементов питания - около 500 тестов.
- Индикатор низкого уровня заряда элементов питания.

Ни при каких обстоятельствах не вскрывайте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.

Только технический департамент компании Objectif Prevention может производить обслуживание и ремонт устройства.

Любые нарушения данной инструкции могут привести к искажению результатов измерений и автоматическому отказу от гарантии.

В случае любых неполадок, верните устройство продавцу вместе с кассовым чеком.

Комплект поставки:

- Электронный алкотестер "ethyway" – 1 шт.
- Сменный мундштук с односторонним клапаном – 5 шт.
- Алкалиновая батарея AAA 1,5 В - 4 шт.
- Футляр с ремешком для переноски устройства – 1 шт.

Установка элементов питания:

Снимите крышку, установленную на задней стороне устройства.

Схема устройства



► Измерения уровня алкоголя в крови:

- Установите сменный мундштук на измерительный датчик (внимание: используйте новый мундштук для каждого измерения).
- Нажмите и удерживайте кнопку "TEST", пока устройство не включится. На дисплее не появится надпись "WAIT". Устройство проведет обратный отсчет от 10 до 0.
- После этого на дисплее появится надпись "blow" и бегущая строка с символом "C".
- Глубоко вдохните и выдыхайте в мундштук до тех пор, пока звуковой сигнал не перестанет звучать (как правило, требуется от 6 до 8 секунд).
- На дисплее появится надпись "WAIT" и бегущая строка с символом "0". Устройство измерит уровень алкоголя в Вашей крови.
- Результаты измерения будут отображены на дисплее. При уровне алкоголя более чем 0,24 мг/л, на дисплее появится слово "HI" и прозвучит звуковой сигнал.
- На дисплее может отобразиться надпись "Err" (ошибка) в случае если Вы выдыхали недостаточно сильно и долго.

► Важные примечания

- Употребление некоторых продуктов, напитков и сигарет может исказить результаты измерения.
- Проводите измерения не ранее чем через 20 минут после употребления алкоголя. В противном случае уровень алкоголя в крови, который покажет прибор, будет меньше действительного. Для более точного результата, сделайте повторный тест через 30 минут после первого измерения.
- Никогда не проводите измерения сразу после употребления алкоголя. В противном случае, остатки и пары алкоголя в ротовой полости могут повредить устройство.
- Используйте новый мундштук для каждого измерения.
- Выдыхайте в мундштук до тех пор, пока звучит сигнал. Сделайте глубокий вдох перед тестированием.
- На дисплее может отобразиться надпись "Err" (Ошибка) в случае если Вы выдыхали недостаточно сильно и долго.
- Устройство автоматически выключится после отображения ошибки.
- Для получения точных результатов, проводите измерения при температуре воздуха от 10 до 40°C.
- Не используйте устройство в слишком шумной среде, это может привести к искажению результатов.
- При перемещении устройства с холода в тепло и обратно, выждите несколько минут, прежде чем начать измерение.
- Используйте щелочные элементы питания.
- На дисплее отображается количество тестов, сделанных с момента включения устройства.
- Не оставляйте устройство в агрессивной внешней среде (среде, содержащей коррозионные газы).
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами.
- Избегайте падений и тряски устройства.
- Не используйте устройство во взрывоопасной и легковоспламеняющейся среде.
- Если Вы планируете не использовать устройство в течение длительного времени, извлеките элементы питания из устройства.
- При включении устройства после длительного хранения, результаты первых трех измерений могут быть недостоверными.

► Отображение информации на дисплее **ETHYWAY**

Сообщение	Описание
HI + красная подсветка дисплея + звуковой сигнал	Превышен лимит содержания алкоголя 0,24 мг/л
Err	Ошибка при измерении 1. Вы выдохнули недостаточно сильно 2. Вы прервали выдох 3. Выдох длился менее 6 секунд 4. Вы не выдохнули в устройство
	Низкий уровень заряда батареи
На дисплее ничего не отображается	замените элементы питания

Помните, уровень алкоголя в крови может повыситься в течение часа после употребления алкоголя.

Результаты тестирования при помощи устройств, применяемых сотрудниками ГИБДД, являются приоритетными над измерениями, сделанными данным прибором.

Пожалуйста, не садитесь за руль в нетрезвом состоянии, это опасно для Вашего здоровья и здоровья окружающих.

► Калибровка устройства:

Необходимо осуществлять калибровку устройства каждые 12 месяцев / 500 тестов, в зависимости от того что наступит раньше.



Фирма-изготовитель: OBJECTIF PREVENTION, 7, улица MICARDIERE 50530 Сартильи, Франция, Тел. 02 33 48 92 15 - Факс: 02 33 48 92 49
Адрес производства: OBJECTIF PREVENTION, 7, улица MICARDIERE 50530 Сартильи, Франция, Тел. 02 33 48 92 15 - Факс: 02 33 48 92 49

Эксклюзивный дистрибьютор продукции OBJECTIF PREVENTION в РФ и странах СНГ: ООО "СИТИТЕК"

Все рекламации по качеству и комплектности товара, заявки на гарантийный и послегарантийный ремонт направлять:
426032, РФ, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.2 ООО "СИТИТЕК"
Гарантийный срок – 2 года

Техническая поддержка по РФ: 8-800-555-40-78

ethyway - Инструкция по эксплуатации