

ETHYLEC

Электронный алкотестер с электрохимическим сенсором
Соответствует стандарту NFX 20-704



► Комплект поставки

- Электронный алкотестер ETHYLEC – 1 шт.
- Сменный мундштук с односторонним клапаном – 10шт.
- Алкалиновый элемент питания 9V – 1 шт.
- Адаптер для подключения к гнезду автомобильного прикуривателя 12V DC – 1 шт.
- Футляр с ремешком для переноски устройства – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

► Описание устройства

Электронный алкотестер ETHYLEC оснащен датчиком, определяющим силу выдоха, а также электрохимическим сенсором. Данные технологии применяются в алкотестерах, которые используют сотрудники ГИБДД, что гарантирует высокую точность измерений.

Устройство предназначено для использования в личных целях, на предприятиях, в ресторанах, ночных клубах и других заведениях.

С помощью алкотестера ETHYLEC Вы в любой момент можете проверить уровень алкоголя в своей крови.

Самостоятельная оценка степени опьянения

=

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ + БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожалуйста, не садитесь за руль в нетрезвом состоянии,
это опасно для Вашего здоровья и здоровья окружающих.

► Технические характеристики

- Электрохимический сенсор
- Время подготовки к работе: 15 секунд
- Время дыхания на датчик, необходимое для измерений: 7 - 8 секунд.
- Сила выдоха: 10 литров/минуту
- Погрешность измерения: +/- 0.025 мг/литр на каждые 0.20 мг/литр
- Интервал измерения: от 0.00 до 0.24 мг/литр
- Звуковой сигнал и текстовое уведомление "НГ" при превышении нормы алкоголя в крови, установленной законодательством (0,25 мг/литр)
- Температурный режим использования: от 10°C до 40°C

Температурный режим хранения: 0°C до 50°C

- Тестовое измерение для калибровки устройства
- Необходимо осуществлять калибровку устройства каждые 12 месяцев / 1200 тестов, в зависимости от того что наступит раньше.

Размеры устройства: 115 x 60 x 23 mm

- Вес: 105 г., без элемента питания
- Время измерения: не более 60 секунд
- Жидкокристаллический дисплей
- Энергопотребление: Алкалиновая батарея 9V и адаптер для подключения к гнезду автомобильного прикуривателя 12V

Ресурс элемента питания- 500 измерений.

Индикатор низкого уровня заряда батареи

Фирма-изготовитель: OBJECTIF PREVENTION, 7, улица MICARDIERE 50530 Сартильи, Франция, Тел. 02 33 48 92 15 - Факс: 02 33 48 92 49

Адрес производства: OBJECTIF PREVENTION, 7, улица MICARDIERE 50530 Сартильи, Франция, Тел. 02 33 48 92 15 - Факс: 02 33 48 92 49

Эксклюзивный дистрибьютор продукции OBJECTIF PREVENTION в РФ и странах СНГ: ООО "СИТИТЕК"

Все рекламации по качеству и комплектности товара, заявки на гарантийный и постгарантийный ремонт направлять:

426032, РФ, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.2 ООО "СИТИТЕК"

Гарантийный срок – 2 года

Техническая поддержка по РФ: 8-800-555-40-78




objectif prévention
division éthylométrie

► Схема устройства




Сменный мундштук,
Предупреждение: не заслонять. **fi**


Адаптер для подключения
к гнезду автомобильного
прикуривателя

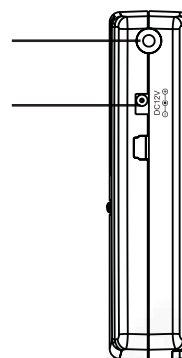

► Инструкция по эксплуатации

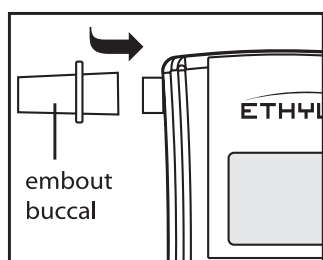

- Нажмите и удерживайте кнопку “TEST” до тех пор пока на дисплее не появится надпись “WAIT”.

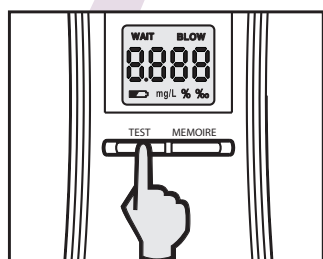


- Устройство проведет обратный отсчет от 15 до 0 (как правило это занимает 6 - 9 секунд)



- После того, как устройство будет готово к работе, на дисплее появится надпись “BLOW” и символ “C”. Глубоко вдохните, затем выдыхайте в мундштук до тех пор пока не перестанет звучать сигнал



- На дисплее появится надпись “WAIT” и символ “0”
- Устройство измерит уровень алкоголя в Вашей крови. **fi**

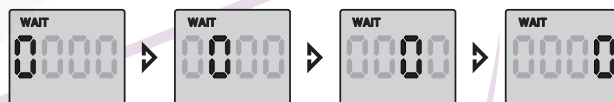

- Результаты измерения будут отображены на дисплее. При уровне алкоголя более чем 0,24 мг/л, на дисплее появится слово “HI” и прозвучит звуковой сигнал.



- На дисплее может отобразиться надпись “Err” (ошибка) в случае если Вы выдыхали недостаточно сильно и долго.



► Сохранение результатов измерений в память устройства

По завершению измерения, Ваш результат будет отображаться на дисплее в течении 20 секунд.

В это время, Вы можете нажать кнопку “MEMORY” для того что бы посмотреть Ваши предыдущие результаты.

Кнопка “MEMORY” активна только в течении этих 20 секунд. Выждите 20 секунд после окончания текущего теста, перед началом нового.



Результаты тестирования при помощи устройств, используемых сотрудниками ГИБДД, являются приоритетными над измерениями, сделанными данным прибором

