

**SITITEK™**

426032, Удмуртская республика,  
г. Ижевск, ул. К.Маркса, д. 1а  
Тел. +7 (3412) 65-07-85  
E-mail: tender@sititek.com



# МУНДШТУК SITITEK УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Д

ДЛЯ АНАЛИЗАТОРОВ ПАРОВ  
ЭТАНОЛА В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ

## ИНСТРУКЦИЯ

ИЗДЕЛИЕ ИЗГОТОВЛЕНО СОГЛАСНО  
ТУ 22.29.29-001-0136453538-2020

Серийный выпуск.  
Партия УМ-2004

Число, месяц, год

Срок годности  
3 года

**Мундштук изготовлен из полипропилена с защитной сеткой внутри. Служит для подачи выдыхаемого потока воздуха к чувствительному сенсору. Мундштук находится в индивидуальной упаковке.**

Мундштук является принадлежностью к медицинскому изделию согласно ГОСТ 31508-2012 «Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования». Принадлежности – это предметы, самостоятельно не являющиеся медицинскими изделиями и по целевому назначению применяемые совместно с медицинским изделием либо в его составе для того, чтобы медицинское изделие могло быть использовано в соответствии с целевым назначением.

**Принадлежность мундштук SITITEK “Универсальный Д” совместим:**

- с анализатором паров этанола в выдыхаемом воздухе AlcoHunterPROX3
- с анализатором паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcotest 5510  
(ПУ № РЗН 2016/5191 от 26.12.2016 года)
- с анализатором паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcotest 6510  
(ПУ № РЗН 2014/989 от 26.08.2014 года)
- с анализатором паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcotest 6810  
(ПУ № ФСЗ 2008/01290 от 24.03.2008 года)
- с анализатором паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcotest 6820  
(ПУ № РЗН 2016/5237 от 13.01.2017 года)
- с анализатором паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcotest 7510  
(ПУ № ФСЗ 2011/10491 от 06.09.2011 года)

**Применение:**

- Извлечь мундштук из полиэтиленового пакета и вставить в гнездо для установки мундштука непосредственно перед выполнением теста;
- Для следующего теста использовать новый мундштук;
- Мундштук с поврежденной индивидуальной упаковкой не применять;
- Повторное использование мундштуков не допускается.



Изготовитель: ИП Березина А.В.

Почтовый адрес:

426032, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.1А

Тел. +7 (3412) 65-07-85

E-mail: tender@sititek.com